

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Termékleírás és várható klinikai haszon:

A termék két részből áll, a külső állítható magasságú fém vázból és a kivehető mosható, fertőtleníthető légpárnából. Két méretben érhető el, a páciens és a műtét csonk pozíciójától függően alkalmazandó a megfelelő méret.

Indikáció:

Láb veleszületett vagy szerzett, részleges vagy teljes hiánya.

Ajánlás:

A légláb felhasználása kórházi, intézményi keretek között történik. A légláb használatával az egyik leggyakoribb szövődemény megelőzhető, kezelhető. A csonk ödéma megfelelő pólyázás mellett, a korai ideiglenes protézissel, u. n. légláb használatával, intermittáló légpumpa kezeléssel, gyógytornával csökkenthető, vagy elkerülhető.

Egy frissen amputált beteg végleges alsó végtagi protézisének elkészítése akár 4-6 hetet is igénybe vehet, ami alatt problémás az állás, sétálás gyakorlására alkalmas.

A légláb segítségével a műtét után rövid idővel már elkezdheti a járás újratanulását a páciens, néhány nap után elkezdhetik a terapeuták a beteg mobilizációját. Mindemellett a légláb belső légpárnás betétje segítségével a műtési csonk formázása is megtörténik.

Kontraindikáció:

Amennyiben a beteg lábra állítása nem lehetséges egyéb ok miatt (ép láb egyéb sérülése, beteg alkalmatlansága a járásra, stb)

A termék használata intézményi keretek között kell, hogy történjen, minden esetben gyógytornász, vagy orvos jelenlétében. A termék nem alkalmas arra, hogy a beteg egyedül járjon a segítségével, vagy ideiglenes műlábként használja az eszközt huzamosabb ideig. Használata felügyelet mellett, járást segítő keretben, felügyelet mellett, ne haladja meg a szakemberek által javasolt maximum időtartamot naponta, fokozatosan szoktassák a beteget a használatához!

Használati útmutató:

A léglábat először a gördülő talp felett található furatoknál be kell állítani a páciens testmagasságához. Ezután helyezzük fel a csonkra a felfújható tokrészt és kézi pumpa segítségével fel kell fújni a kívánt méretre. A járás megkezdése előtt mindig ellenőrizni kell, hogy a légláb megfelelően illeszkedjen és a páciens biztonságosan használni tudja.

A terméket a páciens egyedül, gyógytornász vagy terapeuta felügyelete nélkül nem használhatja.

Használati és tisztítási útmutató

Léglábak

(Alapvető UDI-DI: 5996320AIRL12R)

Leeresztése a külön erre a célra szolgáló leeresztő szelep megnyitásával, kézi erővel történik.

Tisztítási útmutató:

Autoklávval tisztítható, vagy kézzel, langyos vízzel, semleges mosószerrel.

Használaton kívül leeresztett állapotban tárolandó.

Anyaga: kordúra, amely vízálló, tisztítható, 100%-ban poliamid (PA)

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

RS-LEG



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz

