


Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

[www.rexsan.hu](http://www.rexsan.hu)

[iroda@rexsan.hu](mailto:iroda@rexsan.hu)

20/214-0616

### Termékleírás és várható klinikai haszon:

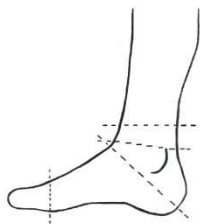

Az eszköz krónikus bokaízületi gyulladás, szalagsérülés konzervatív kezelésére alkalmas.

A bokarögzítő hatékonyan stabilizálja a sérült ízületet, megszüntetve a fájdalmas mozgást, a beteg járóképessé válik. A bokarögzítő teste rugalmas szövetből készült. Előnye, hogy belefér a cipőbe és képes

megakadályozni a bokaízület be- és kifordulását, ezzel is megelőzve a későbbi sérüléseket és az azzal járó kezeléseket.

### Indikáció:

Krónikus bokaízületi instabilitás, krónikus bokaízületi gyulladás, szalagsérülés konzervatív kezelése.

### Ajánlás:

A termék használata előtt kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó tanácsait a megfelelő használatot illetően.

Akut bokasérülések, ficam, szalagszakadások, bokaízületi rándulások, bokaízület krónikus instabilitása, érzékeny bokaízületek, ízületi gyulladás esetén ajánlható.

### Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! A termékre nem kerülhetnek zsír- és savtartalmú anyagok, kenőcsök vagy oldatok!

A következő betegségek esetén a segédeszköz felhelyezése és hordása csak az orvossal történő egyeztetés alapján javasolt:

1. Bőrbetegségek és bőrsérülések az ortézissel fedett területen, különösen gyulladásos tünetek esetén. Közvetlen sebre, amelyek duzzanattal, bőrpírral és melegséggel járnak.
2. Visszeresség (varikozitás), különösen vénás keringési zavarral. Ha egy időben más terméket is (pl. kompressziós harisnyát) használna.
3. Nyirokkeringési zavarok, valamint minden olyan tisztázatlan eredetű duzzanat, amely a felhelyezett segédeszköztől számítva a test távolabbi részén helyezkedik el. Tisztázatlan lágyrészi duzzanatok.
4. Érzés- és keringészavarok, pl. cukorbetegség (diabetes mellitus).

### Használati útmutató

#### Boka ortézisek

(Alapvető UDI-DI: 5996320ANKL12R)

Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék!

Ha szokatlan változásokat vesz észre magán (pl. a panaszok fokozódása), vagy úgy érzi, hogy kényelmetlen, vagy fájdalmas viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésen, vagy tanácskozzon szakemberrel! Hosszabb pihenés idejére (pl. alvás, hosszabb ülés) le kell venni, ha az orvos más képp nem rendel.

### Használati útmutató:

A boka külső és belső oldalán 1-1 formára alakított fémsín helyezkedik el, így biztosítjuk a boka stabil rögzítését. A termék záródása fűzővel vagy tépőzárral történik. A talp felől, a boka felé széles gumipánt van rögzítve, mely keresztben tépőzárral fogható össze. A síneket ne távolítsuk el az eszközből, mert így nem érjük el az oldalirányú támasztást. Tisztításkor figyeljünk, hogy a jobb és baloldalnak megfelelően tegyük vissza a sint. Ügyeljünk, hogy a gumiszalagot folyamatosan feszítve tekerjük 8-as alakban a boka körül. A termék könnyen kezelhető, viselése nem okoz allergiás bőrpanaszokat.

A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.

### Tisztítási útmutató:

Mosás előtt a síneket távolítsa el. A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben, semleges mosószerrel, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószer maradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárát dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani. Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos! Ha a termék elvesztette rugalmasságát, vagy a termék használatát befolyásoló látható sérülés található rajta, kérjük, ne alkalmazza tovább a terméket.

### Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Amennyiben az eszközzel kapcsolatban súlyos váratlan eseményt tapasztal, kérjük jelentse azt elérhetőségeinken és az Ön laccíme szerinti tagállam illetékes hatóságánál.

### RB-40 / Sport stabil boka méretezés:



Méret	Boka felett	Boka	Sarok átló	Lábfej
1/S	22 cm	20 cm	16 cm	20 cm
2/M	24 cm	22 cm	18 cm	21 cm
3/L	26 cm	24 cm	17 cm	22 cm
4/XL	28 cm	26 cm	18 cm	22 cm
5/XXL	32 cm	28 cm	18 cm	24 cm



### RB-40 fűzős méretezés:

Méret	Boka méret
1	19-22 cm
2	22-26 cm
3	26-30 cm



### Bokakarika:

Méret	Boka méret
S	cm
M	cm
L	cm
XL	cm

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.  
[www.rexsan.hu](http://www.rexsan.hu) [iroda@rexsan.hu](mailto:iroda@rexsan.hu)  
 20/214-0616

Használati útmutató  
 Boka ortézisek  
 (Alapvető UDI-DI: 5996320ANKL12R)



**RB-101 szalagos bokarögzítő méretezés:**

Méret	
Univerzális	50 cm



**RB-102 szőtt bokarögzítő méretezés:**

Méret	Boka méret
S	15-19 cm
M	19-23 cm
L	23-28 cm
XL	28-33 cm



**Tulajdonságok:**

A termék elasztikus anyagból készül, mely az izomzatot nem gyengíti, de megfelelő tartást biztosít.

**Termék leírása:**

Két végén gumikarikában végződő gumipánt. Laza bokaizület rögzítésére. Dagadó, fájó boka megtartására alkalmazható.

**Használat:**

A megfelelő méret kiválasztása után az egyik karikába akassza be a sarkát, majd tekerje körül a bokán és a másik karikát ismét akassza a sarkára.

**CE** A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz