

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Termékleírás és várható klinikai haszon:

A termék hálós vagy szivacsos, neoprén/vászon anyagból készül. Egy pánt segítségével rögzítjük az eszközt a nyakba és a testhez. A pántok tépőzárral kapcsolódnak a kartartó részhez.

A termék használata során a felső végtag tehermentesítésével, a vállízület nyugalmi állapotba helyezésével elősegíti a gyorsabb gyógyulást és csökkenti az esélyét további ízületi panaszok kialakulásának.

Indikáció:

Vállízületi és felső végtagi műtétek után, luxatio humeroscapularis, luxatio acromioclavicularis, contusio omii felkar törése után, gyulladásozó állapotok fennállásakor, ficamok esetén.

Ajánlás:

A sérült kar nyugalomba helyezésére, megtartására és a törzshöz való rögzítésére szolgál. Alkalmazható a felkar és alkar törése, gyulladásozó állapotok fennállásakor, műtétek után, ficamok esetén.

Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! Közvetlenül sebre nem kerülhet. Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék! A termék használata előtt kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó tanácsait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy érzi, kényelmetlen, vagy fájdalmas a viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésén, vagy konzultáljon szakemberrel!

Használati útmutató:

Helyezzük a kart a kartartóba. A pántot a vállon átvezetjük és rögzítjük a tépőzárral. Két részes eszköz esetén a második pánttal a kart a törzshöz kell rögzíteni.

A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.

Tisztítási útmutató:

A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben semleges mosószerrel, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószermaradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárakat dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani.

Használati útmutató

Kartartók

(Alapvető UDI-DI: 5996320ARMS14L)

Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos! Ha a termék elvesztette rugalmasságát, vagy a termék használatát befolyásoló látható sérülés található rajta, kérjük, ne alkalmazza tovább a terméket.

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

RB-74 méretezés:

Méret	Könyök - tenyér közép táv
1	40 cm
2	50 cm



RB-170 méretezés:

Méret	Könyök - tenyér közép táv
S	25-30 cm
M	30-35 cm
L	35-38 cm
XL	38-41 cm
XXL	41-45 cm



J 93128 Neurotenblak



J 93128 Fehér kartartó

Méret	Könyök feletti kerület
S	22-24 cm
M	25-29 cm
L	30-34 cm
XL	35-40 cm
XXL	> 40 cm




Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.
www.rexsan.hu iroda@rexsan.hu
20/214-0616

Használati útmutató
Kartartók
(Alapvető UDI-DI: 5996320ARMS14L)



Kétrészes kartartó



 A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz