

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

[www.rexsan.hu](http://www.rexsan.hu)

[iroda@rexsan.hu](mailto:iroda@rexsan.hu)

20/214-0616

### Termékleírás és várható klinikai haszon:

Hasfali műtétek után kifejezetten előnyös a rugalmas haskötő viselése, amely elősegíti a szövetek visszatapadását, illetve tehermentesíti a varratokat. Általában tépőzárral rögzíthetők, több méretben kaphatók. Használata segít megelőzni a sérv kialakulását, ezzel a is csökkentve a későbbi szövődmények lehetőségét.

### Indikáció:

Hasfali műtétek, terhesség esetén, szülés, fogyás után, illetve megereszkedett hasfal, hasfali sérv, valamint izomgyengeség és kötényhas esetén.

### Ajánlás:

Az elasztikus haskötő hasfali műtétek után, izomgyengeség esetén alkalmazható. A haskötő megfelelő szorítását az elől elhelyezett tépőzár biztosítja. Stomások is viselhetik.

### Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! Közvetlenül sebre nem kerülhet. Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék! A termék használata előtt kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó tanácsait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy látja, kényelmetlen, vagy fájdalmas a viselése gyermekének, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésen, és konzultáljon szakemberrel!

### Használati útmutató:

A megfelelő méret kiválasztása után a haskötőt elől tépőzárazza össze.

### Tisztítási útmutató:

A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben semleges mosószerrel, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószermaradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárakat dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani. Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos!

### Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

### Használati útmutató

#### Haskötők

(Alapvető UDI-DI: 5996320BELT12)

Ha bármilyen rendelleneséget tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

### RB-32 méretezés:

Méret	Derékbőség
1	70-80 cm
2	80-90 cm
3	90-100 cm
4	100-110 cm
5	110-120 cm
6	120-130 cm
7	130-140 cm



### RB-33 méretezés:

Méret	Derékbőség
1	70-80 cm
2	80-90 cm
3	90-100 cm
4	100-110 cm
5	110-120 cm
6	120-130 cm
7	130-140 cm



### J 93163 méretezés:

Méret	Derékbőség
S	80-90 cm
M	91-100 cm
L	101-110 cm
XL	111-120 cm
XXL	121-130 cm
XXXL	>130 cm



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz