


Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

[www.rexsan.hu](http://www.rexsan.hu)

[iroda@rexsan.hu](mailto:iroda@rexsan.hu)

20/214-0616

#### Termékleírás és várható klinikai haszon:

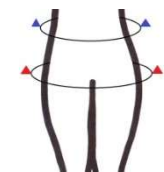

A fűző hátrésze laminált kelméből készül, a gerincoszlop két oldalán 1-1 pálcával erősítjük meg, mely a hát alatti résztől a gerinc alsó szakaszáig stabilan támasztja a derekat. A fűző eleje és oldalrésze elasztikus gumiból készül, az eleje közepén tépőzárral zárható. A fűző a

medence stabil tartását biztosítja. A fűző tehermentesíti, rögzíti a medencét, enyhíti a fájdalmat, pihenteti a hátizmokat, ezzel is hozzájárulva az anatómiai testhelyzet fenntartásához, megelőzve további ízületi panaszok kialakulását és segítve a gyógyulást.

#### Indikáció:

Lumbago, postdiscectomias szindróma, spondylosis, spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine dislocatione.

#### Ajánlás:

Háti és derék gerincszakasz megbetegedéseinek kezelésére, hosszabb idejű állás vagy nehéz fizikai munka, emeléssel járó megterhelés esetén. Porckorongsérv, porckopás, elmeszesedés, folyamatos gerinc fájdalom esetén ajánlott.

#### Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! Közvetlenül sebre nem kerülhet. Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék! A termék használata előtt kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó tanácsait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy érzi, kényelmetlen, vagy fájdalmas a viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésen, vagy konzultáljon szakemberrel!

#### Használati útmutató:

A megfelelő méret kiválasztása után eleje közepén tépőzárral zárjuk be a fűzőt.

A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.

#### Figyelmeztetés:

A fűző viseléséhez fokozatosan szokjunk hozzá. A viselés idejét lassan növelje.

#### Használati útmutató

#### Fűzők

(Alapvető UDI-DI: 5996320CRST16B)

#### Tisztítási útmutató:

A terméket tisztítását 40°C-os, semleges mosószeres vízben végezze. Centrifugálni, vasalni tilos! A tépőzárát dörzsöléssel tisztítani tilos! Szárítása fektetve történjen. Ha a termék elvesztette rugalmasságát, vagy a termék használatát befolyásoló látható sérülés található rajta, kérjük, ne alkalmazza tovább a terméket.

#### Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztató, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

#### RB-23 fehér méretezés:

Méret	Derékátmérő	Csípőátmérő
2	60-70 cm	70-80 cm
3	70-80 cm	80-90 cm
4	80-90 cm	90-100 cm
5	90-100 cm	100-110 cm
6	100-110 cm	110-120 cm
7	110-120 cm	120-130 cm
8	120-130 cm	130-140 cm



#### RB-23 fekete méretezés:

Méret	Csípőátmérő
S	75-85 cm
M	85-95 cm
L	95-105 cm
XL	105-115 cm
XXL	115-125 cm
XXXL	125-135 cm



#### RB-23 testszínű méretezés:

Méret	Derékbőség	Csípőbőség
S	60-70 cm	70-80 cm
M	70-80 cm	80-90 cm
L	80-90 cm	90-100 cm
XL	90-100 cm	100-110 cm
XXL	100-110 cm	110-120 cm
XXXL	110-120 cm	120-130 cm



Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

[www.rexsan.hu](http://www.rexsan.hu)

[iroda@rexsan.hu](mailto:iroda@rexsan.hu)

20/214-0616

Használati útmutató

Fűzők

(Alapvető UDI-DI: 5996320CRST16B)



RB-25 fehér méretezés:

Méret	Derékbőség	Csipőbőség
S/2	60-70 cm	70-80 cm
M/3	70-80 cm	80-90 cm
L/4	80-90 cm	90-100 cm
XL/5	90-100 cm	100-110 cm
XXL/6	100-110 cm	110-120 cm
XXXL/7	110-120 cm	120-130 cm
XXXXL/8	120-130 cm	130-140 cm
Extra		

RB-125 méretezés:

Méret	Derékátmérő
S	75-85 cm
M	85-95 cm
L	95-105 cm
XL	105-115 cm
XXL	115-125 cm



**CE** A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz

RB-25 testszínű méretezés:

Méret	Derékbőség	Csipőbőség
S	60-70 cm	70-80 cm
M	70-80 cm	80-90 cm
L	80-90 cm	90-100 cm
XL	90-100 cm	100-110 cm
XXL	100-110 cm	110-120 cm

