

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Termékleírás és várható klinikai haszon:

Alumínium csőből készül, forma-tervezett mankók, amelyek kartámasza műanyagból készült, és a tapadást biztosító gumi véggel. A mankó használata segíti a postoperatív állapotokból való gyógyulást. Krónikus ellátásban, pedig növeli a páciens önállóságát.

Indikáció:

Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladás, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protézis postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

Ajánlás:

Baleseti sérülések után (Derék, csípő, alsó végtagtörés, ficam, rándulás, műtéti be-avatkozás), továbbá bármilyen járásbizonytalanság esetén, posztoperatív fázisban ajánlott eszköz.

Kontraindikáció és figyelmeztetés:

Kérjük amennyiben úgy érzi, a segédeszköz segítségével is bizonytalan a járása, szédül, egyensúlyában nem biztos, ne használja a terméket és kérjen segítséget! Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a botvég gumi ép-e, és ha nem, azonnal cserélje ki! A kopott, átszakadt gumi miatt megcsúszhat a bot, és fennáll az elesés veszélye! Kérjük csúszós, jeges, fagyott úton fokozott óvatossággal használja a terméket! A termék használata előtt és a megfelelő beállításhoz kérje ki kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó segítségét!

Használati útmutató:

A magasság a mankó alsó csővén található csapos külső rögzítő gyűrű kiemelésével, majd a két cső egymáshoz viszonyított elmozdítása után a kívánt furatba történő bepattintással állítható be.

A mankó terhelhetősége: max. 130 kg és 90 kg.

A mankó használatánál szakorvos, gyógytornász, ergoterapeuta vagy forgalmazó utasításait kell figyelembe venni. A mankóval történő közlekedést tanulni kell, különösen a lépcsőn történő közlekedést. Síkos, pl. jeges úton, a mankóval fokozott óvatossággal közlekedjünk!

A botvég gumi elhasználódása esetén azt ki kell cserélni. A botvég gumik a kiszolgálási helyen és gyógyászati segédeszköz üzletekben kaphatók.

Használati útmutató

Mankók

(Alapvető UDI-DI: 5996320CRTH15C)

Tisztítási útmutató:

Semleges mosószerrel, langyos vízzel lemosva, majd puha ruhával áttörölve.

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.


Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

RS-20



RS-08



 A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz

