

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Termékleírás és várható klinikai haszon:

Az elasztikus neoprén anyag és a tépőzár rendszer megfelelően támasztja meg a könyökizületet. Az ortézisbe elhelyezett izületes sín korlátozza az ízület mozgását. A sín az ortézisből könnyedén kivethető. Megfelelő használat esetén stabilizálja a könyökizületet, ezzel csökkentve a mozgásból eredő fájdalmat és segítve a gyógyulást.

Indikáció:

Indikáció: Postoperatív állapot, könyökizületi instabilitás, arthrosis, arthritis.

Ajánlás:

Alkalmazása ajánlott a könyökizület mozgásainak korlátozottsága, gyulladás vagy törés utáni állapot ellátására, amikor az ízület csak korlátozottan mozgatható. Ugyancsak alkalmazhatjuk benuulás, vagy nagyfokú csonthiány következtében lötyögővé vált ízület esetén. Ilyenkor a jó kézfunkciók mellett a felső végtag használhatóságát nagymértékben javítja.

Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! A termékre nem kerülhetnek zsír- és savtartalmú anyagok, kenőcsök vagy oldatok!

A következő betegségek esetén a segédeszköz felhelyezése és hordása csak az orvossal történő egyeztetés alapján javasolt:

- Bőrbetegségek és bőrsérülések az ortézissel fedett területen, különösen gyulladásos tünetek esetén. Közvetlen sebre, amelyek duzzanattal, bőrpírral és melegséggel járnak.
- A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia.
- Nyirokkeringési zavarok, valamint minden olyan tisztázatlan eredetű duzzanat, amely a felhelyezett segédeszköztől számítva a test távolabbi részén helyezkedik el. Tisztázatlan lágyrészi duzzanatok.
- Érzés- és keringészavarok, pl. cukorbetegség (diabetes mellitus).
- A termék anyagával szembeni intolerancia.

Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék!

Ha szokatlan változásokat vesz észre magán (pl. a panaszok fokozódása), vagy úgy érzi, hogy kényelmetlen, vagy fájdalmas viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésén, vagy tanácskozzon szakemberrel! Hosszabb pihenés

Használati útmutató Könyök ortézisek (Alapvető UDI-DI: 5996320ELBW13B)

idejére (pl. alvás, hosszabb ülés) le kell venni, ha az orvos más-képp nem rendeli.

Használati útmutató:

Nyissa ki a tépőzárát. Helyezze fel a könyökrögzítőt úgy, hogy a kör alakú kivágás a könyök közepére kerüljön. A könyökrögzítőt könyök alatt és fölött tépőzárral biztonságosan rögzítjük, hogy az elmozdulást a végtagon kizárjuk. A sánt a kezelőorvos utasítása szerint állítjuk be.

A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.

Tisztítási útmutató:

A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben semleges mosószerrel, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószermaradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárát dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani. Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos! Ha a termék elvesztette rugalmasságát, vagy a termék használatát befolyásoló látható sérülés található rajta, kérjük, ne alkalmazza tovább a terméket.

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

RB-39 méretezés:

Méret	Kar átmérő	Könyök átmérő	Csukló átmérő
S	32 cm	28 cm	18 cm
M	34 cm	30 cm	20 cm
L	36 cm	32 cm	22 cm
XL	38 cm	34 cm	24 cm

REX-SAN
medical devices



RB-140 méretezés:

Méret	Csukló átmérő
S	22-24 cm
M	24-26 cm
L	26-28 cm
XL	28-30 cm
XXL	30-32 cm



J 93125 méretezés:

Méret	Csukló átmérő
S	19-22 cm
M	23-26 cm
L	27-30 cm
XL	31-34 cm

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.
www.rexsan.hu iroda@rexsan.hu
20/214-0616

Használati útmutató
Könyök ortézisek
(Alapvető UDI-DI: 5996320ELBW13B)



Sport könyökrögző méretezés:

Méret	Kar átmérő	Könyök átmérő	Csukló átmérő
S	32 cm	28 cm	18 cm
M	34 cm	30 cm	20 cm
L	36 cm	32 cm	22 cm
XL	38 cm	34 cm	24 cm



CE A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz