

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Termékleírás és várható klinikai haszon:

Teniszkönyök pánt a könyök ingyulladásának megelőzésére és kezelésére, nem csak teniszezők vagy golfozók számára. Teniszkönyök bárkinél kialakulhat, aki túlterheli alkarjai ínszalagjait. Az ún. teniszkönyök fájdalmat a leggyakrabban egy ismétlődő könyökmozdulat miatt kialakuló ínhüvelygyulladás okozza. A tenisz könyökpánt megtámasztja az érzékeny területet, tehermentesít és segít elkerülni, a további panaszok kialakulását, valamint elősegíti a gyógyulást.

Indikáció:

Könyök íngyulladása, könyöktáji tendopathiák, amelyeket munka és sportolás közben izomterhelés vált ki, vagy balesetek is okozhatják.

Ajánlás:

A teniszkönyök pánt kiváló támaszt és védelmet biztosít sportsérülés okozta kéz és csuklófájdalom esetén.

Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! A termékre nem kerülhetnek zsír- és savtartalmú anyagok, kenőcsök vagy oldatok!

A következő betegségek esetén a segédeszköz felhelyezése és hordása csak az orvossal történő egyeztetés alapján javasolt:

1. Bőrbetegségek és bőrsérülések az ortézissel fedett területen, különösen gyulladásoz tünetek esetén. Közvetlen sebre, amelyek duzzanattal, bőrpírral és melegséggel járnak.
2. A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia.
3. Nyirokkeringési zavarok, valamint minden olyan tisztázatlan eredetű duzzanat, amely a felhelyezett segédeszköztől számítva a test távolabbi részén helyezkedik el. Tisztázatlan lágyrészi duzzanatok.
4. Érzés- és keringészavarok, pl. cukorbetegség (diabetes mellitus).
5. A termék anyagával szembeni intolerancia.

Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék!

Ha szokatlan változásokat vesz észre magán (pl. a panaszok fokozódása), vagy úgy érzi, hogy kényelmetlen, vagy fájdalmas viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésen, vagy tanácskozzon szakemberrel! Hosszabb pihenés idejére (pl. alvás, hosszabb ülés) le kell venni, ha az orvos más-képp nem rendel.

Használati útmutató
Tenisz könyökpántok
(Alapvető UDI-DI: 5996320ELBW23D)

Használati útmutató:

Nyissa ki a tépőzárát, majd helyezze fel a könyökrögzítőt úgy, hogy a könyök ízület alatt helyezkedjen el a pánt 2-3 cm-re.

A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.

Tisztítási útmutató:

A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben semleges mosószerrel, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószermaradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárát dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani. Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos! Ha a termék elvesztette rugalmasságát, vagy a termék használatát befolyásoló látható sérülés található rajta, kérjük, ne alkalmazza tovább a terméket.

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztató, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

RB-142



REX-SAN
medical devices

RB-143



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz