

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

[www.rexsan.hu](http://www.rexsan.hu)

[iroda@rexsan.hu](mailto:iroda@rexsan.hu)

20/214-0616

#### Termékleírás és várható klinikai haszon:

Az alumínium sín megfelelő megtámasztást biztosít a sérült ujjnak, míg a polietilénhab belés kényelmesebbé teszi a sint.

Az ujj megtámasztása segíti a műtétek utáni felépülést. A különböző sérülésekből adódó fájdalom enyhítésére is alkalmazható, ezzel is gyorsítva a gyógyulást.

#### Indikáció:

Ujjmerevség, osteoarthritis, ujjfájdalom esetén, az ujj feszítőszalag szakadása, húzódás, törés és ízületi elmozdulás esetén, valamint a kalapács ujj kiegyenesítésére.

#### Ajánlás:

Az ujj sín használata ajánlott ujjmerevség, osteoarthritis, ujjfájdalom esetén, az ujj feszítőszalag szakadása, húzódás, törés és ízületi elmozdulás esetén, valamint a kalapács ujj kiegyenesítésére.

#### Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! Közvetlenül sebre nem kerülhet. Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék! A termék használata előtt kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó tanácsait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy érzi, kényelmetlen, vagy fájdalmas a viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésén, vagy konzultáljon szakemberrel!

#### Használati útmutató:

Az eszköz az ujjak mozgását nem engedi, rögzíti az ízületeket a kívánt pozícióban.

A test felőli része habbéléssel van ellátva a kényelmes viselet érdekében.

A sín anyaga alumínium, megfelelő merevítést biztosít az ujj rögzítéséhez. Ugyanakkor könnyen alakítható a kívánt alakra. A felhelyezéskor nagy figyelmet kell fordítani a helyes beállításra. A beállításokat a kezelő orvos javaslata alapján kell elvégezni, lehetőleg gyógyászati segédeszköz forgalmazó, vagy ortopéd műszerész szakember segítségével.

#### Tisztítási útmutató:

A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben, semleges mosószerrel, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószer maradék bőrirritációt okozhat.

#### Használati útmutató

#### Ujj sín

(Alapvető UDI-DI: 5996320FNGR14E)

#### Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendelleneséget tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

#### RB-180 méretezés:

Méret	Ujj átmérő
S	4,5-5 cm
M	5-6 cm
L	6-7 cm



#### RB-181 méretezés:

Méret	Ujj átmérő
S	4,5-5 cm
M	5-6 cm
L	6-7 cm



#### RB-182 méretezés:

Méret	Ujj átmérő
S	4,5-5 cm
M	5-6 cm
L	6-7 cm



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz