

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616


Használati útmutató

Láb ortézisek

(Alapvető UDI-DI: 5996320FOOT163)



Termékleírás és várható klinikai haszon:

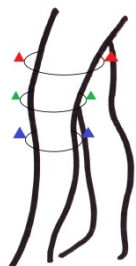

A combban/vádliban lévő izomfeszültség vagy egyéb fájdalmas állapot esetén megvédi az adott területet sportolás közben és után. A bent tartott hő növeli a keringést, ami elősegíti a gyorsabb regenerációt. Az eszköz rugalmas neoprén anyagból készült, mely biztosítja a különböző formájú combokra/vádlókra a pontos illeszkedést. A comb/vádlis ortézis enyhíti a fájdalmat, megelőzi a további panaszok kialakulását és segíti a gyógyulást.

Indikáció:

Izomszakadás, izomfeszültség.

Ajánlás:

A comb/vádlis ortézis alkalmazása ajánlott sportolás közben az izomzat védelmére, húzóadás esetén. Körkörös bandázsok biztosítják a megfelelő oldalirányú stabilitást.

Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! A termékre nem kerülhetnek zsír- és savtartalmú anyagok, kenőcsök vagy oldatok!

A következő betegségek esetén a segédeszköz felhelyezése és hordása csak az orvossal történő egyeztetés alapján javasolt:

- Bőrbetegségek és bőrsérülések az ortézissel fedett területen, különösen gyulladásos tünetek esetén. Közvetlen sebre, amelyek duzzanattal, bőrpírral és melegséggel járnak.
- Visszeresség (varikozitás), különösen vénás keringési zavarral. Ha egy időben más terméket is (pl. kompressziós harisnyát) használna.
- Nyirokkeringési zavarok, valamint minden olyan tisztázatlan eredetű duzzanat, amely a felhelyezett segédeszköztől számítva a test távolabbi részén helyezkedik el. Tisztázatlan lágyrészi duzzanatok.
- Érzés- és keringészavarok, pl. cukorbetegség (diabetes mellitus).

Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék!

Ha szokatlan változásokat vesz észre magán (pl. a panaszok fokozódása), vagy úgy érzi, hogy kényelmetlen, vagy fájdalmas viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésen, vagy tanácskozzon szakemberrel! Hosszabb pihenés idejére (pl. alvás, hosszabb ülés) le kell venni, ha az orvos másképp nem rendel.

Használati útmutató:

A megfelelő méret kiválasztása után helyezze fel a segédeszközt úgy, hogy a térd alatt és a boka között helyezkedjen el. A termék nem rendeltetés szerinti használata esetén hátráltatja a beteg gyógyulását. A használati utasítás be nem tartása a garancia elvesztésével jár.

A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.

Tisztítási útmutató:

A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben semleges mosószerrel, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószermaradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárát dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani. Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos! Ha a termék elvesztette rugalmasságát, vagy a termék használatát befolyásoló látható sérülés található rajta, kérjük, ne alkalmazza tovább a terméket.

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétékor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

RB-115 Vádlirögítő


Méret	Vádlis átmérő
S	31-34 cm
M	34-37 cm
L	37-40 cm
XL	40-44 cm
XXL	44-48 cm



Vádlirögítő

RB-115

Felhasználás, rendeltetés: a vádliban lévő izomfeszültség vagy egyéb fájdalmas állapot esetén megvédi az adott területet sportolás közben és után.

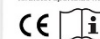

Gyártó:
Rex-San Orvostechnikai Eszközgyártó, Forgalmazó és Javító Kft.
H-1106 Budapest, Fehér út 10.

Méret: M

MD

LOT

07/2021

A 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai eszköz

RB-116 Combbrögítő


Méret	Comb átmérő
S	46-48 cm
M	48-50 cm
L	50-52 cm
XL	52-54 cm
XXL	54-56 cm



Combbrögítő

RB-116

Felhasználás, rendeltetés: a combban lévő izomfeszültség vagy egyéb fájdalmas állapot esetén megvédi az adott területet sportolás közben és után.

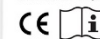

Gyártó:
Rex-San Orvostechnikai Eszközgyártó, Forgalmazó és Javító Kft.
H-1106 Budapest, Fehér út 10.

Méret: M

MD

LOT

07/2021

A 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti I. osztályba sorolt orvostechnikai eszköz



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz