

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Termékleírás és várható klinikai haszon:

Pavlik hámot 6 hónapnál fiatalabb csecsemők csipőficam kezelésére alkalmazzák (2-3 hónapig, napi 23 órában), általában ez az első lépés a kezelésben.

Vászonnal borított pántokból, tépőzárból és kapcsokból álló hám. Arra szolgál, hogy a csecsemő lábait szét és megfelelő szögben tartsa.

Használatát az orvosok általában 6 hétig javasolják, de ez lehet hosszabb is.

Indikáció:

Csipő veleszületett subluxatiója, instabil csipő, csipő egyéb deformitása, csipő dysplasiája estén ajánlott.

A Pavlik hám a kisbaba combcsontjai egy meghatározott szögben rögzítik meggátolva a lábak elmozdulását. Kizárólag a fürdés idejére szabad levenni. Kérjük, mindig tartsa be az orvos utasításait és jelenjen meg az előírt kontrollokon, mert a kengyelt folyamatosan adaptálni kell.

A Pavlik-hám jelentős eszköz a csecsemők csipőficam kezelésében, amely az esetek többségében szinte teljes egészében gyógyítható!

Ajánlás:

Pavlik hámot 6 hónapnál fiatalabb csecsemők csipőficam kezelésére alkalmazzák (2-3 hónapig, napi 23 órában).

Kontraindikáció:

A Pavlik-hám használata kizárólag orvosi felügyelet mellett, az orvos utasításai alapján történhet! Kérjük mindig tartsa be az orvos és a szakszemélyzet utasításait!

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! Közvetlenül sebre nem kerülhet. Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék! A termék használata előtt kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó tanácsait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy látja, kényelmetlen, vagy fájdalmas a viselése gyermekének, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésen, és konzultáljon szakemberrel!

Használati útmutató:

A derékövet a derék köré kell csatolni, a két kengyelt a lábakra kell tépőzárazni. A lábkegyelek szalagjait a derékön csatjain át kell bújtatni, majd meghúzni.

Használata alatt rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges!

Használati útmutató Hámok (Alapvető UDI-DI: 5996320HARN13L)

Tisztítási útmutató:

A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben semleges mosószerrel, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószermaradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárak dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani. Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos!

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.



Pavlik hám méretezés:

Méret	Mellkas átmérő
M	41-51 cm
L	51-61 cm
XL	61-71 cm



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz