

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Termékleírás és várható klinikai haszon:

Testbarát, erős, bélelt, gumiszalagokból készített, elől állíthatóan tépőzárral záródó heveder. Háti gerincszakasz nyíl irányú tartási hibáinak korrigálására ajánlott. A heveder használatával enyhébb fokú gerinc deformitások megelőzhetők. Különböző terápiás kezelések kiváló kiegészítője.

Indikáció:

Degeneratív elváltozások, idegfájdalmak, egyszerű stabil törések, luxation, artritis, luxatiós törések primer nyújtását követően diszlokációra hajlamos elváltozásoknál a fájdalom csökkentésére, megelőzésére.

Ajánlás:

A tartásjavító heveder a vállak hátra húzásával helyes tartásra kényszeríti a gerincet. Alkalmazása ajánlott a helytelen testtartás korrekciójára, a gyenge hátizomzat támogatására, ülőmunkát végző felnőtteknél vagy növekedésben lévő gyerekeknél valamint a háti gerincszakasz nyílirányú tartási hibáinak kezelésére.

Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! Közvetlenül sebre nem kerülhet. Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék! A termék használata előtt kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó tanácsait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy érzi, kényelmetlen, vagy fájdalmas a viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésén, vagy konzultáljon szakemberrel!

Használati útmutató:

Bújtassa át kezeit a pántokon, hogy keresztezzék egymást a háton, majd rögzítse az eszköz elején található tépőzárakat.

A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.

Tisztítási útmutató:

Kérem, hogy a terméket kéz meleg vízben, finom mosószerrel mossa! Mosás közben ne dörzsölje, és ne kefélje az anyagot! Az alapos öblítés után függeszte szárítsa! Csavarás, centrifugálás szintén tilos! Ne szárítsa szárítógépben, napon vagy fűtőtesten! Vegytisztítás, benzín vagy oldószer használata tilos! Balsamok,

Használati útmutató Hevederek (Alapvető UDI-DI: 5996320HARN23N)

bőrápoló és olajos krémek használata csökkentik a termék élettartamát! Ha a termék elvesztette rugalmasságát, vagy a termék használatát befolyásoló látható sérülés található rajta, kérjük, ne alkalmazza tovább a terméket.

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendelleneséget tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.



J93123

| |
|-------|
| Méret |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| XXL |



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz