

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Termékleírás és várható klinikai haszon:

A termék hasi és oldal része dupla pamutvászomból, hátrésze rugalmas gumiszövetből készül. Az adaptálható hasi sérvkötő használata ajánlott a megereszkedett hasfal megtartására, valamint a köldök és hasi sérv visszatartására szolgál. A megfelelően kiválasztott sérvkötő segít fenntartani a kialakult állapotát a sérvnek, majd műtét után megtartja a hasfalat, ezzel is hozzájárulva a gyógyuláshoz.



Indikáció:

Hasfali sérv, operált hasfali sérv, köldök sérv, lágyéksérv.

Ajánlás:

Egyenes irányú, ovális, ferde irányú lágyéksérv visszatartására használjuk. A pelotta hátoldala tépőzárral van ellátva, így a pelotta könnyedén elhelyezhető oda, ahová a sérvkaput a legjobban takarja. A gumiöv és a combszalag segítségével a megfelelő szorosságra kell állítani, hogy a sérvkaput elzárja.

Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! Közvetlenül sebre nem kerülhet. Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék! A termék használata előtt kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó tanácsait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy érzi, kényelmetlen, vagy fájdalmas a viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésén, vagy konzultáljon szakemberrel!

Használati útmutató:

A lágyéksérvkötő viselete fehérmemű fölött legyen. Győződjön meg róla, hogy a termék mérete megfelelő. Nyissa ki a tépőzárakat, ha van a terméken. A felvételnél ügyelni kell arra, hogy a sérvkötő felvétele fekvő történjen, a lábak nyíhe felhúzásával. Ebben az esetben a sérv visszahúzódik a medencébe, amennyiben nem, úgy egy kis masszírozással vissza kell helyezni a sérvet. Ezután kell a pelottát ráhelyezni a sérvkapura és bekapcsolni a gumiövet, valamint a combszalagot, majd kezünkkel a pelottát megtartva fel lehet állni. Első felvételnél nem árt szakember véleményét kikérni a sérvkötő viseléséről! Létezik kétoldali kivitel is. Ebben az esetben is úgy járunk el, mint az egyoldali lágyéksérvkötő felhelyezésénél.

A haskötőt a megfelelő méret kiválasztása után a has oldalrészén tépőzárral rögzítsük úgy, hogy kellően szoros legyen és megfelelően tartson.

Használati útmutató

Sérvkötők

(Alapvető UDI-DI: 5996320HERN14G)

Tisztítási útmutató:

A mosás a pelotta eltávolítása után, 40°C-nál nem melegebb vízben semleges mosószerelemmel, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószerezmaradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárakat dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani. Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos! Ha a termék elvesztette rugalmasságát, vagy a termék használatát befolyásoló látható sérülés található rajta, kérjük, ne alkalmazza tovább a terméket.

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

Adaptálható egyoldali lágyéksérvkötő:

bal oldali / jobb oldali



Adaptálható kétoldali lágyéksérvkötő



Adaptálható hasi sérvkötő méretei:

Méret	Derék körméret
1	80-85 cm
2	85-90 cm
3	90-95 cm
4	95-100 cm
5	100-110 cm
6	110-120 cm
7	110-115 cm
8	115-120 cm
9	120-125 cm
10	125-130 cm
11	130-135 cm



RB-120 méretei:

Méret	Derék körméret
S	75-85 cm
M	85-95 cm
L	95-105 cm
XL	105-110 cm
XXL	110-120 cm



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz

