

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

[www.rexsan.hu](http://www.rexsan.hu)

[iroda@rexsan.hu](mailto:iroda@rexsan.hu)

20/214-0616

#### Termékleírás és várható klinikai haszon:

A szilikon talpbetét anyagának köszönhetően segíti a súlyelosztást, megfelelően pozicionálja a lábat. Csökkenti a különböző terhelésből adódó fájdalmakat és a lábat érő ütődéseket. Elsősorban kényelmi és megelőző funkciója hozzájárul, hogy a láb különböző betegségeit elkerüljük.

#### Indikáció:

Javasolt a sarkon lévő csontnyúlvány, csonttrikulás, achilles-ín gyulladás, sarok táji fájdalom, lábközép táji fájdalom, isiász, rándulás és zúzódás esetén. Illetve a kényelem növelésére. Mozgás közben sarki ütődés csökkentésére. Különböző sportokban, atléták és tornászok számára is. Hosszanti boltozat (lúdtalp) és haránt boltozat, lábközéptáji fájdalom, fascia gyulladás esetén, a lábközép fájdalomának enyhítésére, a lábfej elülső részei betegségeinek kezelésére is használható.

#### Ajánlás:

A szilikonos talpbetét haránt emeléssel, kíméletes talpboltozattal rendelkezik, amely figyelembe veszi a láb anatómiáját, és a nyugalom maximális érzését nyújtja. A boltív úgy működik, mint egy természetes emelő, amely véd és kerüli a felület érintkezését a lábközéppel, ezáltal új dinamikát adva a használója járásának. Sajátos kialakítása miatt ortopédusok és traumatológusok is ajánlják.

#### Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! Közvetlenül sebre nem kerülhet. Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék! A termék használata előtt kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó tanácsait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy érzi, kényelmetlen, vagy fájdalmas a viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésen, vagy konzultáljon szakemberrel!

#### Használati útmutató:

Távolítsa el a cipőjében lévő talpbetéteket. Helyezze be a szilikon talpbetét mindkét cipőjébe. Ügyeljen rá, hogy megfelelően illeszkedjenek a talpbetétek a cipőkben.

#### Tisztítási útmutató:

Rendszeresen tisztítsa! Meleg langyos vízzel, semleges mosószerekkel törölje át és tisztítás után győződjön meg arról, hogy a termék teljesen száraz, mielőtt használná. Ne érintkezzen szennyező anyagokkal, illetve erős vegyszerekkel. Hintőpor használatára nincs szükség, de javasolt az izzadság ellen alkalmazni.

#### Használati és tisztítási útmutató

##### Szilikon talpbetét

(Alapvető UDI-DI: 5996320INSL16R)

#### Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

A termék nem hőálló. Nagy hőmérsékletnek kitéve veszít tulajdonságaiból, ezért ne tegye ki 120°C feletti hőmérsékletnek. A terméket használja rendeltetés szerint, és ne kombinálja más termékekkel. Amennyiben allergiás a latex és gumi anyagokra ellenőrizze a felhasznált anyagokat. Ha a termék tartalmaz ilyen anyagokat, használjon pamut alálöltözőt, hogy elnyelje a nedvséget és az izzadságot.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

#### RB-90 méretezés:

Méret	Lábméret
S	34-36 cm
M	36-38 cm
L	38-41 cm
XL	41-44 cm
XXL	44-47 cm

#### Ajánlás:

A szilikon sarokemelő kiváló támaszt biztosít a sarok és a boka számára, csökkenti az itt fellépő fájdalmat és duzzanatot. Enyhíti a talpi íngyulladás, csontsarkantyú és izomhúzódás okozta lábfájdalmakat, a minden lépésnél jelentkező ütések és feszültség csillapításával. A szilikon sarokemelő célja, hogy kényelmesebb tegye a járást. Nem szolgál a lábak orvosi állapotának kezelésére, és nem helyettesíti az ortopédiai eszközöket sem.



#### RB-91 méretezés:

Méret	Cipőméret (EU)
S	35-38 cm
M	38-41 cm
L	42-44 cm

#### Ajánlás:

A lábközépcsont szilikon párna a lábközépcsontban fellépő fájdalom és zsibbadás esetén ajánlott, mivel segít a megfelelő súlyelosztásban ez által csökkenti a fájdalmat az egész lábfejben. A lábközép szilikon párna célja, hogy kényelmesebb tegye a járást. Nem szolgál a lábak orvosi állapotának kezelésére, és nem helyettesíti az ortopédiai eszközöket sem.

#### Használati útmutató:

Helyezze fel a lábközép szilikon párnán található gyűrűt a lábujjára úgy, hogy a párna a lábközépcsontja alatt helyezkedjen el.



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz