

Termékleírás és várható klinikai haszon:

Az elasztikus neoprén anyag megfelelően támasztja a térdizületet. A tépőzárakkal rögzíthetjük a terméket a lábra, melyek az egyén igénye szerint szorosabbra és lazábbra is köthetők. A mozgásterjedelem korlátozását kéttengelyű sín párral biztosítja, mely szükség esetén eltávolítható az ortézisből. A térd ortézis megtámasztja az ízületet, ezzel is enyhíti a fájdalmat, megelőzi a további panaszok kialakulását és segíti a gyógyulást.

Indikáció:

Térdízületi sérülések, szalag instabilitással járó térdpanaszok, térdműtétet követő kezelésre, amennyiben a műtét után átmeneti ideig (várhatóan 6 hétig) a térdízület mozgása csak korlátozott mozgástartományban engedélyezhető.

Ajánlás:

A hosszú térdtámasztó tok elsősorban térdízület műtét utáni kezelésre szolgál, illetve amikor a térdízületben törés vagy gyulladás miatt instabilitás, elmozdulás tapasztalható az ízületben, de a mozgás és terhelés nem fájdalmas.

Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! A termékre nem kerülhetnek zsír- és savtartalmú anyagok, kenőcsök vagy oldatok!

A következő betegségek esetén a segédeszköz felhelyezése és hordása csak az orvossal történő egyeztetés alapján javasolt:

1. Bőrbetegségek és bőrsérülések az ortézissel fedett területen, különösen gyulladáshoz vezető tünetek esetén. Közvetlen sebre, amelyek duzzanattal, bőrpírral és melegséggel járnak.
2. Visszeresség (varikozitás), különösen vénás keringési zavarral. Ha egy időben más terméket is (pl. kompressziós harisnyát) használna.
3. Nyirokkeringési zavarok, valamint minden olyan tisztázatlan eredetű duzzanat, amely a felhelyezett segédeszköztől számítva a test távolabbi részén helyezkedik el. Tisztázatlan lágyrészi duzzanatok.
4. Érzés- és keringészavarok, pl. cukorbetegség (diabetes mellitus).

Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék!

Ha szokatlan változásokat vesz észre magán (pl. a panaszok fokozódása), vagy úgy érzi, hogy kényelmetlen, vagy fájdalmas viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésen, vagy tanácskozzon szakemberrel! Hosszabb pihenés idejére (pl. alvás, hosszabb ülés) le kell venni, ha az orvos másképp nem rendel.

Használati útmutató:

A termék két részből áll, egy felső combtok és egy lábszártok részből. A két egység fokbeállítós sínrel kapcsolódik össze. A sín rögzítését tépőzárral végezzük. A csuklórészt neoprén védővel látjuk el, hogy a beteg térdízületét, és ruházatát megvédjük a károsodástól. A tokokat puha frottírszövetből készítjük, mely nedvszívó és antiallergén. A tokok elől, középen tépőzárral záródnak. A tokokat 2-2 tépőzárral rögzítjük. A megfelelő fokbeállítást szakember végezze el.

A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.

Tisztítási útmutató:

A mosás előtt a bújatatókból vegye ki a szivacsos részeket, a tépőzárakat zárja össze. A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben semleges mosószerezrel, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószerezmaradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárakat dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani. Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos! Ha a termék elvesztette rugalmasságát, vagy a termék használatát befolyásoló látható sérülés található rajta, kérjük, ne alkalmazzon tovább a terméket.

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékekre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz