


Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Termékleírás és várható klinikai haszon:

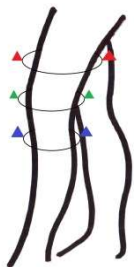

Térdízületi sérülések, szalagműtétek után ajánlott a termék viselése. A mozgásterjedelmet és a rögzítést sín párral biztosítja. Az eszköz rugalmas neoprén anyagból készült, mely biztosítja a különböző formájú térdekre a pontos illeszkedést. A térd külső és belső oldalain sántokokban helyezkedik el a sín pár. A térd ortézis megtámasztja az ízületet, ezzel is enyhíti a fájdalmat, megelőzi a további panaszok kialakulását és segíti a gyógyulást.

Indikáció:

Térdízületi instabilitás.

Ajánlás:

Térdízületi sérülések, szalagműtétek után ajánlott a termék viselése. A mozgásterjedelmet és a rögzítést sín párral biztosítja. Az eszköz rugalmas neoprén anyagból készült, mely biztosítja a különböző formájú térdekre a pontos illeszkedést. A térd külső és belső oldalain sántokokban helyezkedik el a sín pár.

Sport rugós térd rögzítő alkalmazása ajánlott sportolás közben a térdízületek védelmére, térsérülések, szalag instabilitással járó térdpanaszok, húzóadás és térd fájdalom esetén. Oldalanként két-két merevítő rugós spirál és körkörös bandázsok biztosítják a megfelelő oldalirányú stabilitást.

Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! A termékre nem kerülhetnek zsír- és savtartalmú anyagok, kenőcsök vagy oldatok!

A következő betegségek esetén a segédeszköz felhelyezése és hordása csak az orvossal történő egyeztetés alapján javasolt:

1. Bőrbetegségek és bőrsérülések az ortézissel fedett területen, különösen gyulladáshoz vezető tünetek esetén. Közvetlen sebre, amelyek duzzanattal, bőrpírral és melegséggel járnak.
2. Visszeresség (varikozitás), különösen vénás keringési zavarok. Ha egy időben más terméket is (pl. kompressziós harisnyát) használja.
3. Nyirokkeringési zavarok, valamint minden olyan tisztázatlan eredetű duzzanat, amely a felhelyezett segédeszköztől számítva a test távolabbi részén helyezkedik el. Tisztázatlan lágyrészi duzzanatok.

Használati útmutató

Térd ortézisek

(Alapvető UDI-DI: 5996320KNEE14L)

4. Érzés- és keringészavarok, pl. cukorbetegség (diabetes mellitus).

Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék!

Ha szokatlan változásokat vesz észre magán (pl. a panaszok fokozódása), vagy úgy érzi, hogy kényelmetlen, vagy fájdalmas viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésen, vagy tanácskozzon szakemberrel! Hosszabb pihenés idejére (pl. alvás, hosszabb ülés) le kell venni, ha az orvos másképp nem rendel.

Használati útmutató:

A megfelelő méret kiválasztása után helyezze fel a segédeszközt úgy, hogy a térdok kivágása a térdkalács alsó feléig érjen, a sínek kétoldalt megfelelően illeszkedjenek. Végül tépőzárrakkal rögzítjük a tokot, hogy az stabilan tarthassa a térdet. A termék nem rendeltetés szerinti használata esetén hátráltatja a beteg gyógyulását. A használati utasítás be nem tartása a garancia elvesztésével jár.

A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.

Tisztítási útmutató:

Mosás előtt a síneket távolítsa el. A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben semleges mosószernel, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószermaradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárak dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani. Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos! Ha a termék elvesztette rugalmasságát, vagy a termék használatát befolyásoló látható sérülés található rajta, kérjük, ne alkalmazza tovább a terméket.

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.



RB-38, RB-38 NY, RB-43 méretezés:

Méret	Comb körméret	Térd körméret	Vádlí körméret
S	37 cm	30 cm	28 cm
M	42 cm	33 cm	30 cm
L	46 cm	36 cm	34 cm
XL	50 cm	39 cm	37 cm
XXL	54 cm	41 cm	40 cm



RB-110, RB-111, RB-112, RB-113 méretezés:

Méret	Térd átmérő
S	31-34 cm
M	34-37 cm
L	37-40 cm
XL	40-44 cm
XXL	44-48 cm

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Használati útmutató
Térd ortézisek
(Alapvető UDI-DI: 5996320KNEE14L)



XXL 38-46 cm



J 93127 méretezés:

Méret	Láb körméret térd felett
S	28-38 cm
M	32-42 cm
L	35-45 cm
XL	38-48 cm
XXL	41-51 cm



J 93124 méretezés:

Méret	Láb körméret térd felett
S	28-35 cm
M	29-37 cm
L	31-39 cm
XL	35-42 cm

Sport térdbandázs méretezés:

Méret	Térd körméret
S	28-38 cm
M	32-42 cm
L	35-45 cm
XL	38-48 cm
XXL	41-51 cm

CE A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz