

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

[www.rexsan.hu](http://www.rexsan.hu)

[iroda@rexsan.hu](mailto:iroda@rexsan.hu)

20/214-0616

Használati útmutató  
Deréktámaszok  
(Alapvető UDI-DI: 5996320LUMB17F)



#### Termékleírás és várható klinikai haszon:

Anyaga könnyű neoprén, mely tökéletes hőszigetelő, ezáltal a sérült területet állandó hőmérsékleten tartja. A bennlévő merevítő és a keresztirányú gumipánt fokozza a stabilitást.

Használatát tépőzáras rögzítés könnyíti. Használata hozzájárul a gyorsabb gyógyuláshoz és segít megelőzni a további sérüléseket. Anyaga miatt akár sportoláshoz is használható, de minden olyan esetben ajánljuk viselését, amit az indikáció előír, vagy aki a fenti panaszokat tapasztalja.

**Indikáció:** csigolyakopás, csonttrikulás, porckorong deformitás, lumbágó, hátfájás, gerinctáji fájdalmak, hasfali izomzat gyengeség esetén ajánlott.

#### Ajánlás:

Krónikus derék-, deréktáji izom fájdalom esetén.

#### Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! Közvetlenül sebre nem kerülhet. Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék! A termék használata előtt kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó tanácsait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy érzi, kényelmetlen, vagy fájdalmas a viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésén, vagy konzultáljon szakemberrel!

#### Használati útmutató:

A megfelelő méret kiválasztása után elől tépőzárassa össze.

A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.

#### Tisztítási útmutató:

A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben semleges mosószerrel, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószermaradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárakat dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani. Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos! Ha a termék elvesztette rugalmasságát, vagy a termék használatát befolyásoló látható sérülés található rajta, kérjük, ne alkalmazza tovább a terméket.

#### Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétékor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

#### Sport stabil derékvő méretezés:

Méret	Derékbőség
S	75-80 cm
M	85-90 cm
L	95-100 cm
XL	105-110 cm
XXL	115-120 cm



#### Sport vesemelegítő méretezés:

Méret	Derékbőség
S	75-80 cm
M	85-90 cm
L	95-100 cm
XL	105-110 cm
XXL	115-120 cm



#### J 93174 méretezés:

Méret	Derékbőség
XS	<80 cm
S	80-90 cm
M	91-100 cm
L	101-110 cm
XL	111-120 cm
XXL	121-140 cm
XXXL	>140 cm



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz