

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Használati útmutató

Haskötők

(Alapvető UDI-DI: 5996320BELT12)



Termékleírás és várható klinikai haszon:

A medenceszorító erős vászonnál vagy elasztikus anyagból készül, elől tépőzárral és hátul lumbális pelottával, az ágyéki gerinc alsó szakaszának megtámasztására. A medencét átfogó, elől tépőzárral vagy fűzéssel szabályozható, viszonylag szabad mozgást engedő szorító öv, hátul a keresztcsontra, oldalt a csípőtővis és a nagytempor közötti területre, elől pedig a symphysisre fekszik fel. A medenceszorító övet a lumbális és sacrális gerincszakasz krónikus megbetegedési esetén, a gerincszakasz támasztására, porckorong károsodása, discopátia, csigolya csúszása, kisizületi arthosis, nagyfokú megterhelés esetén használhatjuk.

Indikáció:

Lumbago, postdiscectomias szindróma, spondylosis, spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine dislocatione.

Ajánlás:

A medenceszorító öv alkalmazása ajánlott instabil gerinc esetén, lumbális porckorong elfajulás esetén valamint lumbális gerinc degeneratív folyamatainak kezdeti szakaszában és porckorong-sérv műtétek után. Alkalmazható hosszabb állással, emeléssel, hajlongással vagy üléssel járó terhelések esetén.

A fűző a medence stabil tartását biztosítja. A fűző tehermentesíti, rögzíti a medencét, enyhíti a fájdalmat, pihenteti a hátizmokat, ezzel is hozzájárulva az anatómiai testhelyzet fenntartásához, megelőzve további izületi panaszok kialakulását és segítve a gyógyulást.

Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! Közvetlenül sebre nem kerülhet. Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék! A termék használata előtt kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó tanácsait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy érzi, kényelmetlen, vagy fájdalmas a viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésen, vagy konzultáljon szakemberrel!

Használati útmutató:

Állítsa be a medenceszorító öv megfelelő méretét, majd rögzítse a tépőzárát. A terméket mindig fehéremű fölött hordja. A termék nem rendeltetés szerinti használata esetén hátráltatja a beteg gyógyulását. Az eszközt csak az orvos külön utasítására lehet alvás közben használni.

Tisztítási útmutató:

A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben semleges mosószerrel, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószermaradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárát dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani. Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos!

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétékor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

RB-35 méretezés:

Csípő átmérő
70 cm
75 cm
80 cm
85 cm
90 cm
95 cm
100 cm
105 cm
110 cm
115 cm
120 cm
125 cm
130 cm



RB-36 méretezés:

Méret	Csípő átmérő
2	60-70 cm
3	70-80 cm
4	80-90 cm
5	90-100 cm
6	100-110 cm
7	110-120 cm
8	120-130 cm



RB-37 méretezés:

Méret	Derék átmérő	Csípő átmérő
2	60-70 cm	70-80 cm
3	70-80 cm	80-90 cm
4	80-90 cm	90-100 cm
5	90-100 cm	100-110 cm
6	100-110 cm	110-120 cm
7	110-120 cm	120-130 cm
8	120-130 cm	130-140 cm



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz