

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

[www.rexsan.hu](http://www.rexsan.hu)

[iroda@rexsan.hu](mailto:iroda@rexsan.hu)

20/214-0616

#### Termékleírás és várható klinikai haszon:

A nyak stabil tartását biztosítja a termék. Elöl közepén az áll alatt alacsonyabb kialakítású, hátul közepén a tarkó vonalában szélesebb. A nyaki ortézis megfelelő rugalmasság mellett anatómiai helyzetben tartja a nyakat, megelőzve a későbbi ízületi fájdalmakat és elváltozásokat.

#### Indikáció:

spondylosis, discopathia, spondylarthrosis a nyaki szakaszon, torticollis, csigolya tumor, nyaki distorsio, degeneratív elváltozások, idegfájdalmak, egyszerű stabil törések, luxáció, luxációs törések primer nyújtását követően, dislocatióra hajlamos elváltozásoknál a fájdalom csökkentésére, megelőzésére.

#### Ajánlás:

A nyaki gerinc betegségeinél a nyak tartására és ezáltal a tünetek csökkentésére szolgáló gyógyászati segédeszköz. Óvja a gerinc nyaki szakaszát a fájdalommal járó mozgásoktól - jó hőszigetelő tulajdonsága miatt a nyakat melegen tartja.

#### Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! Közvetlenül sebre nem kerülhet. Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék! A termék használata előtt kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó tanácsait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy érzi, kényelmetlen, vagy fájdalmas a viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésen, vagy konzultáljon szakemberrel!

#### Használati útmutató:

A termék méretenként szélesebb és keskenyebb változatban készül. A habszivacs pamut anyaggal van bevonva. A tarkó vonalában tépőzárral záróik, mely szabályozható.

A termék nem rendeltetés szerinti használata esetén hátráltatja a beteg gyógyulását. A használati utasítás be nem tartása garancia elvesztésével jár.

#### Tisztítási útmutató:

A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben semleges mosószerrel, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószermaradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárakat dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani. Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos!

#### Használati útmutató Nyak ortézisek (Alapvető UDI-DI: 5996320NECK13W)

#### Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendelkezést tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

#### RB-73 méretezés:

Méret	Magasság x hossz
0	6x40 cm
1	8x50 cm
2	10x50 cm
3	8x60 cm
4	10x60 cm
5	12x60 cm



#### RB-75 méretezés:

Méret	Nyak átmérő
S	28-33 cm
M	34-39 cm
L	40-45 cm



**CE** A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz