

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Használati útmutató
Párnák
(Alapvető UDI-DI: 5996320PLLW18N)



Termékleírás és várható klinikai haszon:

A párna tehermentesíti a gerinc végződést, illetve a nyíláshoz helyezett testterületet, így bármilyen eredetű fájdalom csökkenthető ülés közben a párna használatával. A modern világban az ülés a munkavégzés fontos része, így a terápia során a már kialakult panaszok mellett növeli az ülés időt. A megfelelő párna kiválasztása segít megelőzni különböző betegségek kialakulását.

Indikáció:

felfekvés megelőzésére, farkcsont, keresztcsont fájdalom kezelésére, aranyér esetén, valamint az ülés okozta panaszok esetén

Ajánlás:

Ülőpárna használata javasolt farkcsont fájdalom, keresztcsont felfekvés megelőzésére és kezelésére, medencetáji fájdalmak, valamint aranyér esetén, szülést követően és tartós ülés okozta panaszok megelőzésére is használható.

Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! Közvetlenül sebre nem kerülhet. A termék használata előtt kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó tanácsait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy érzi, kényelmetlen, vagy fájdalmas a használata, hagyja abba a termék használatát, változtasson a pozíción, vagy konzultáljon szakemberrel!

Használati útmutató:

Üljön rá a párnára úgy, hogy pozícionálja az érintett területet a párna gyűrű nyitott részéhez. Ez által tehermentesíti a fájdalmas részt. Viseljen ruházatot a termék használata közben!

Tisztítási útmutató:

Távolítsa el a huzatot a párnáról. 30 C-on mosógépben tisztítható a huzat. Tisztítás után győződjön meg arról, hogy a termék teljesen száraz, mielőtt használná.

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendelleneséget tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

RB-192



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz

RB-190



Alkalmazás

Ideális gerincproblémával és hátfájdalmakkal küzdők számára. Segít megelőzni a fej lebillenését és kényelmes utazást biztosít minden körülmények között. Minden fejméretre megfelelő.

Használati útmutató

Helyezze hátulról a nyakára a párnát

Tisztítás

Távolítsa el a huzatot az utazópárnáról. 30°C-on mosógépben tisztítható a huzat. Tisztítás után győződjön meg arról, hogy a termék teljesen száraz, mielőtt használná

Az RB-190 utazópárna nem orvostechnikai eszköz!