

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Használati útmutató

Rollátorok

(Alapvető UDI-DI: 5996320ROLL18Y)



Termékleírás és várható klinikai haszon:

Guruló fékes járókeret (rollátor) stabil felépítésű, nagy terhelhetőségű, jól guruló, összehajtható, könnyen kezelhető, négykerekű, fékes gyógyászati segédeszköz. A könnyebb kanyarodás érdekében az első bolygókerekek csapágyazottak. A hátsó kerekre ható fék egyszerűen kezelhető, a fékkart felfele mozgatva menetfékként, lefele mozgatva rögzítőfékként használható. Járás nehezítettség esetén növeli az önállóságot, segít a hétköznapi távolságok leküzdésében, csökkentve a környezetre háruló ápolási feladatokat.

Indikáció:

Alsóvégtagok izületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége esetén, alsóvégtag-sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag amputáció és protézisállítás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar esetén.

Ajánlás:

Rollátor használatánál szakorvos, gyógytornász, ergoterapeuta vagy forgalmazó utasításait kell figyelembe venni. A járókeret optimális magasságát úgy válasszuk ki, hogy a könyök kissé hajlított legyen, arra támaszkodva viszont a könyök kiegyenesedjen, de ne nyomja fel magasra a vállat. Sikos, jegecs úton, a rollátorral fokozott óvatossággal közlekedjünk!

Kontraindikáció és figyelmeztetés:

A rollátor szilárd, sík talajon használható. Felálláskor és ráülés-kor mindig ügyeljen rá, hogy a fékek legyenek behúzva és lehetőleg sík, szilárd, vízszintes felületen álljon. Kerülje a homokos, lágy talajokat, amelyekből önerőből nem tud kihajtani az eszközzel. Minden használat előtt ellenőrizze a fékek működését, a kerekek állapotát, az ülés és a mozgó részek rögzítését. Amennyiben úgy érzi, hogy segítség nélkül nem tudja használni a rollátort, ne induljon el egyedül és kérjen segítséget!

Használati útmutató:

Az állítható, guruló járókeretet többfunkciós fékkel szereltük fel. A fékkar, mely a fogantyún található menet közbeni és rögzítő fékként is szolgál. A fék egyszerűen kezelhető, a fékkart egyik irányba mozgatva (felfele) menet közbeni fékként, másik irányba (lefele) mozgatva rögzítő fékként használható, mely a hátsó kerekre hat. A fék kioldáshoz húzza a fékkart enyhén felfele. A teleszkópos kartámasz cső lehetővé teszi a kéztámaszok - 78-98 cm közötti magasságban történő beállítását. Ehhez csavarja ki vagy lazítsa meg a szorító csavart, állítsa be a csövet megfelelő

magasságba, húzza meg a szorító csavart. A biztonság érdekében soha ne húzza ki túlzottan a kartámasz csövet, mindig legalább 75 mm maradjon bedugva.

Hajtsa szét teljesen az állítható, guruló járókeret a hátsó vázelem összekötő rúdja lefele nyomásával, addig ameddig a retesz be nem kattant. Összehajtásnál először a nyomja be a műanyag retesz csapját. Vezesse a kartámasz csövet az első vázelem csövébe és a megfelelő helyen a mellékelt csavarral rögzítse! A csavarnak a csövön kiképzett helye van, ami megfogja az elfordulás ellen. Állítsa be fék bowdenek feszességét a fékeknel (a bowden közepén) található csavarokkal. Ha szükséges állítsa a kartámaszokat a kívánt magasságba.

Tisztítási útmutató:

Semleges mosószerrel, langyos vízzel lemosva, majd puha ruhával áttörölve. A rollátor jellegének megfelelően függőleges helyzetben sík padlózatra állítva ajánlatos tárolni.

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.

RS-04EC



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz