

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Használati útmutató

Váll ortézisek

(Alapvető UDI-DI: 5996320SHLD172)

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel bennünket elérhetőségeinken.



RB-51 méretezés:

Méret	Felkarbőség hónalj felé	Felkarbőség könyök felé
S	30-34 cm	28-30 cm
M	34-38 cm	30-32 cm
L	38-42 cm	32-34 cm
XL	42-46 cm	34-36 cm
XXL	46-50 cm	36-38 cm



J 93128 méretezés:

Méret	Felkarbőség könyök felé
S	22-24 cm
M	25-29 cm
L	30-34 cm
XL	35-40 cm
XXL	> 40 cm



Termékleírás és várható klinikai haszon:

Az elasztikus neoprén anyag és a tépőzár rendszer megfelelően támasztja meg a vállat. A váll rögzítésével megakadályozzuk a csontok elmozdulását, így biztosítjuk a gyorsabb gyógyulást. Egyben preventív eszköznek is használható, megtámasztja a vállízületet, ezzel is megelőzve további ízületi panaszok kialakulását.

Indikáció:

Vállízület, alízület és felső végtag műtétei után, luxatio humeroscapularis, luxatio acromioclavicularis, contusio omii, humerus diaphysis középső 3/5-ének törései, velőürsinezés után a stabilitás fokozására, lemezes OS után, ha a belső rögzítés mellett külső stabilizáció is szükséges; törés elhúzódó gyógyulása esetén.

Ajánlás:

Az eszköz alkalmazása ficam, rándulás valamint törés elhúzódó javulása esetén javasolt.

Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! Közvetlenül sebre nem kerülhet. Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék! A termék használata előtt kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó tanácsait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy érzi, kényelmetlen, vagy fájdalmas a viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésen, vagy konzultáljon szakemberrel!

Használati útmutató:

Az eszköz könnyen kezelhető. Felkarra, vállra felhúzva helyezük fel, a hevedert hónalj alatt vezetjük el, ahol hónaljvédő akadályozza a dörzsölődést. A hevedert átvezetjük a bújtatón és tépőzárral rögzítjük.

Tisztítási útmutató:

A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben semleges mosószerrel, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószermaradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárakat dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani. Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos!

Jótállás, szavatosság:



A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz