

Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.

www.rexsan.hu

iroda@rexsan.hu

20/214-0616

Termékleírás és várható klinikai haszon:



Hüvelykujj nyílással ellátott csuklórögzítő, amely a csuklón 2 db tépőzárral, a hüvelykujjánál pedig 1 db tépőzárral állítható az egyéni testparaméterekhez a táblázatban megadott méretek szerint. Az ortézis tenyér felőli részén fém-sínt helyeztünk el, amelynek köszönhetően kiválóan tehermentesíti a csuklóízületet és korlátozza a csukló szabad mozgását, ezzel is segítve a gyógyulást.

Indikáció:

Distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis, tendovaginitis, postoperatív állapot.

Ajánlás:

Ínhüvelygyulladás, posztoperatív állapot után, rándulás, osteo arthritis, akut és krónikus csuklóízületi fájdalmak, megerőltetés esetén ajánlott az ortézis viselése. Korlátozza a csukló szabad mozgását, ami elősegíti a gyorsabb gyógyulást.

Kontraindikáció:

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a terméket! A termékre nem kerülhetnek zsír- és savtartalmú anyagok, kenőcsök vagy oldatok!

A következő betegségek esetén a segédeszköz felhelyezése és hordása csak az orvossal történő egyeztetés alapján javasolt:

1. Bőrbetegségek és bőrsérülések az ortézissel fedett területen, különösen gyulladásos tünetek esetén. Közvetlen sebre, amelyek duzzanattal, bőrpírral és melegséggel járnak.
2. A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia. 3. Nyirokkeringési zavarok, valamint minden olyan tisztázatlan eredetű duzzanat, amely a felhelyezett segédeszköztől számítva a test távolabbi részén helyezkedik el. Tisztázatlan lágyrészi duzzاناتok.
4. Érzés- és keringésszavarok, pl. cukorbetegség (diabetes mellitus).
5. A termék anyagával szembeni intolerancia.

Használati útmutató

Csukló ortézisek

(Alapvető UDI-DI: 5996320WRST1D7)

Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék!

Ha szokatlan változásokat vesz észre magán (pl. a panaszok fokozódása), vagy úgy érzi, hogy kényelmetlen, vagy fájdalmas viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésen, vagy tanácskozzon szakemberrel! Hosszabb pihenés idejére (pl. alvás, hosszabb ülés) le kell venni, ha az orvos másképp nem rendel.

Használati útmutató:

A tenyér felőli oldalon, a csuklóig fém sínt, a kézfejen műanyag merevítőt helyezünk el. A tenyér részén elhelyezett merevítőt a beteg állapotának megfelelően kell behajlítani. A pálcákat mosásnál el kell távolítani. A záródás tépőzárral történik. A csukló magasságában plüssgumi-pánt kerül elhelyezésre, mely fokozza a stabil rögzítést. A termék neoprén anyagból készül méretsorozatban.

A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.

Tisztítási útmutató:

A mosás a sín és a merevítő pálcá eltávolítása után, 40°C-nál nem melegebb vízben semleges mosószerral, csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószermaradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárakat dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani. Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos! Szárítás után a sínt ismét tegyük vissza ügyelve a megfelelő visszahelyezésre. Ha a termék elvesztette rugalmasságát, vagy a termék használatát befolyásoló látható sérülés található rajta, kérjük, ne alkalmazza tovább a terméket.

Jótállás, szavatosság:

Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre.

A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétékor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

Javításra csak tisztított eszközt veszünk át.

Amennyiben az eszközzel kapcsolatban súlyos váratlan eseményt tapasztal, kérjük jelentse azt elérhetőségeinken és az Ön lakcíme szerinti tagállam illetékes hatóságánál.



RB-31 méretezés:

Méret	Csukló átmérő	Csukló feletti átmérő
1	14-16 cm	17-19 cm
2	17-20 cm	20-23 cm
3	21-25 cm	24-27 cm



RB-130 jobb-bal / RB-131 jobb-bal / RB-132 jobb-bal / J 93120 méretezés:

Méret	Csukló átmérő
S	15-17 cm
M	17-19cm
L	19-21 cm
XL	21-23 cm
XXL	23-25 cm



Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10.
www.rexsan.hu iroda@rexsan.hu
 20/214-0616

Használati útmutató
 Csukló ortézisek
 (Alapvető UDI-DI: 5996320WRST1D7)



RB-134 méretezés:

Méret	Csukló átmérő
S	15-19 cm
M	19-21cm
L	21-24 cm
XL	24-28 cm

Csuklószorító méretezés:

Méret	Csukló átmérő
S	15-17 cm
M	17-19cm
L	19-21 cm
XL	21-23 cm
XXL	23-25 cm



CE A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú orvostechnikai eszköz

RB-133 jobb-bal méretezés:

Méret	Csukló átmérő
S	15-19 cm
M	15-19cm
L	19-23 cm
XL	19-23 cm